



El oftalmoscopio directo es un dispositivo médico clásico para oftalmología. Este dispositivo adopta un sistema de lentes profesional, hace que la trayectoria de la luz y la observación de la luz tiendan a ser coaxiales a través del diseño de optimización, lo que hace que los médicos obtengan convenientemente un campo visual claro para examinar las estructuras internas de los ojos. Se utiliza para ver la media dióptrica, la retina y la mácula lútea, etc. Sólo un profesional capacitado en estas habilidades puede utilizar estos dispositivos. El fabricante no será responsable de los daños resultantes si el usuario es el único que asume el riesgo.

Disponemos de accesorios comunes como lentes y bombillas.

Empaque con:

-  Oftalmoscopio
-  Adaptador de Corriente
-  Cable USB
-  Manual de Instrucciones

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA **LATINOAMÉRICA**

G4 Medical
EQUIPOS & SUMINISTROS MÉDICOS




- Atonille el oftalmoscopio. Saque la cabeza del mango del dispositivo, consulte la figura 1.
- Encienda (o apague) el dispositivo presionando hacia abajo como fig.2. Está funcionando cuando la luz verde indicadora está encendida.
- Desplace la rueda del diafragma como en la figura 3 para obtener la apertura
 - necesaria y cambie el dial para obtener los filtros necesarios, sin rojo o azul.
- Gire la rueda de dioptrías en dos direcciones como en la figura 4 para seleccionar una dioptría adecuada, lo que ayuda a obtener una visión de observación más clara para el usuario.
- Diagnosticar apuntando la luz al paciente como fig.5.

Atención:

Cuando la luz indicadora parpadee, cargue el mango; el método de carga consulte "CÓMO CARGAR".

- Si hay algún cortocircuito accidental en el dispositivo, el mango se cortará y el encendido/apagado botón se bloqueará. Después de eliminar el cortocircuito, conecte la línea de datos a la interfaz Micro USB del mango y conecte la alimentación para activar el patrón de bloqueo.

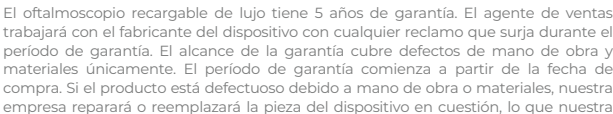

ITEM	HS-OP10F	
Iluminación	Iluminación directa	
Aumento de imagen	15X	
Modelo de bombilla	B206F	
Parámetro eléctrico de la bombilla	3,5 VCC 0,06 A±0,01A	
Luminancia	17,5 lúmenes	
Temperatura de color	3500K ±5%	
Batería	Iones de litio 3,7 V 2100 mAh	
Operación	Temperatura	10°C~35°C
	Humedad	30%~75%
	Presión del aire	700hPa~1060hPa
Almacenamiento y transporte	Temperatura	- 20°C~70°C
	Humedad	10%~90% (Sin condensación)
	Presión del aire	500hPa~1060hPa